


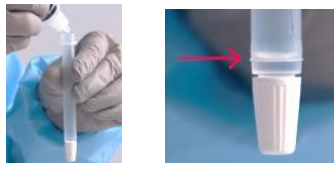
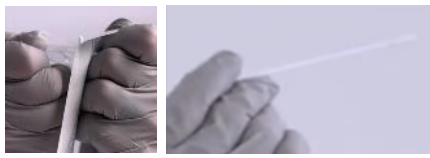

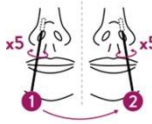
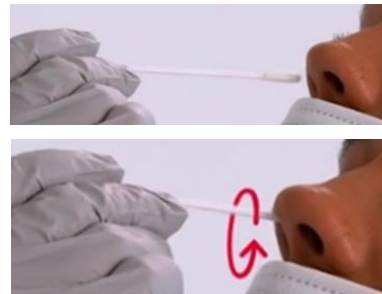

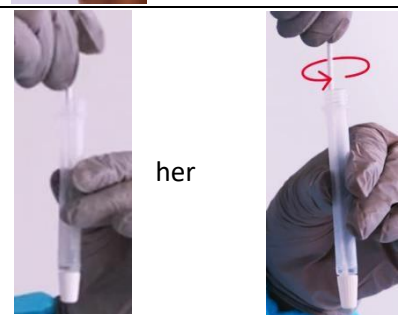
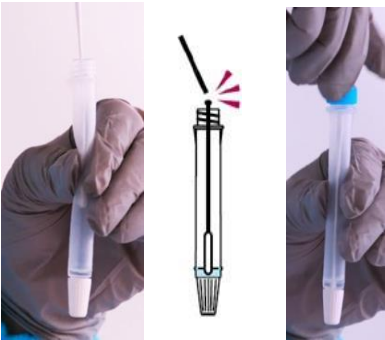






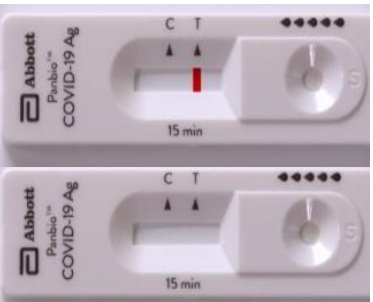


Anweisung zur Durchführung des CoV-2 Schnelltests

1.	Hände gründlich waschen oder desinfizieren	
2.	Spiegel bereitlegen	
3.	Testkassette aus dem Schutzbeutel entnehmen	
4.	Testkassette mit Namen beschriften	
5.	Probenröhrchen in die Halterung stellen	
6.	8-9 Tropfen Pufferlösung in das Probenröhrchen geben (bis zur Fülllinie)	
7.	Tupferstab öffnen und Tupferstab entnehmen Achtung: Tupferkopf darf nicht berührt werden	
8.	Mund- und Nasenschutz unter die Nase ziehen Kopf leicht nach hinten neigen (70 Grad)	
9.	Tupfer ca. 2 cm tief in das erste Nasenloch einführen Ein leichter Widerstand ist zu spüren Tupfer 5 x hin und her drehen Während des Drehens leicht in Richtung Nasenwand (Nasenmitte) drücken Tupfer langsam rausziehen und Vorgang im zweiten Nasenloch wiederholen	 
10.	Mund- und Nasenschutz wieder über die Nase ziehen	
11.	Sofort den Tupferkopf in das Probenröhrchen geben Achtung: Nicht mit dem Tupferkopf die Außenseite des Röhrchens berühren Das Probenröhrchen festhalten und den Tupfer kräftig hin und bewegen und dabei mindestens 5 x gegen die Röhrchen-Innenwand drücken	

12.	<p>Tupferkopf etwas hochziehen Probenröhrchen mit Daumen und Zeigefinger festhalten und zusammenpressen und dabei den Tupferkopf unter Drehbewegung ausdrücken</p> <p>Tupferstiel an der Bruchstelle abbrechen Stäbchenrest entsorgen Probenröhrchen mit dem blauen Deckel verschließen</p>	
13.	<p>Probenröhrchen senkrecht halten und unteren Drehverschluss (weiß) öffnen</p>	
14.	<p>Probenröhrchen leicht zusammendrücken 5 hängende, blasenfreie Tropfen in die Probenvertiefung (S) der Testkassette geben</p>	
15.	<p>Probenröhrchen wieder verschließen (weißer Drehverschluss)</p>	
16.	<p>Testkassette nicht mehr bewegen Kurzzeitwecker auf 15 Minuten stellen</p>	
17.	<p>Negativ: Eine rote Linie erscheint in der Kontrollregion C</p>	
18.	<p>Positiv: (Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion) Zwei rote Linien erscheinen eine in der Kontrollregion C und eine in der Testregion T Foto von der Testkassette machen Gesundheitsamt verständigen PCR-Test zur Kontrolle beim Hausarzt/Tübinger Festplatz Quarantäne Negativer PCR Test: Quarantäne wird aufgehoben</p>	
19.	<p>Ungültiges Testergebnis Der Test muss wiederholt werden</p>	
20.	<p>Entsorgen Sie die Arbeitsmaterialien in den dafür vorgesehenen Müllsäcken</p>	
21.	<p>Arbeitsplatz desinfizieren!</p>	